



Intimate Rose

Poignée pour dilatateur



Instructions d'utilisation

La poignée pour dilateur Intimate Rose est utilisée pour prolonger la portée des dilateurs ou des entraîneurs vaginaux.

Consultez toujours un professionnel de santé avant de commencer un nouveau programme d'entraînement.



Petite taille
Dilatateur 1 à 3



Taille moyenne
Dilatateur 3 à 6



Grande taille
Dilatateur 6 à 8

Compatible avec les dilateurs vaginaux et rectaux



Dilatateurs non inclus.

Comment démarrer

1. Le petit anneau s'utilise avec les dilataateurs 1-3, l'anneau moyen avec les dilataateurs 4-6 et le grand anneau avec les dilataateurs 6-8.
2. Lavez les dilataateurs, la poignée pour dilataateur et l'anneau de connexion avec de l'eau tiède et du savon. Séchez avec une serviette douce.

3. Placez l'anneau avec le petit cercle face vers le haut.



4. Passez l'extrémité du dilataateur à travers le plus petit trou central de l'anneau, puis faites glisser l'anneau tout le long du dilataateur jusqu'à la base.



5. Placez ensuite le dilataateur et l'anneau sur la base de la poignée pour dilataateur et tirez l'anneau vers le bas pour l'ajuster sur le bord de la base.



6. L'anneau en silicone recouvre entièrement le périmètre de la base de la poignée pour dilateur.



7. Utilisez une quantité généreuse de lubrifiant à base d'eau et effectuez votre routine de dilatation.



Entretien général

Nettoyez la poignée pour dilateur, l'anneau et le dilateur à l'eau tiède savonneuse après chaque utilisation. Rangez-les dans un endroit frais et sec et ne les partagez pas.

Si vous constatez un défaut dans votre baguette, contactez-nous pour obtenir un remplacement à l'adresse suivante : Support@IntimateRose.com

Avertissement :

Dispositif non stérile destiné à un usage unique par patient. Sans latex. Ne pas utiliser de lubrifiants à base de silicone.